

# Orthofex

De accu indicatie LED (2) zal rood branden als de accu minder dan 20% lading heeft. U kunt er dan nog ongeveer een uur mee werken. Het is dus raadzaam om altijd de oplader bij u te hebben. Als u de oplader aansluit (8) zal het lampje naast de aansluiting oranje branden tijdens het laden en groen worden als hij volledig is opgeladen. Het duurt ongeveer 4 tot 8 uur om de accu volledig op te laden. U kunt tijdens het opladen de machine gewoon blijven gebruiken.

Met de toerental regelaar (3) kunt u het gewenste toerental van de freis worden ingesteld, met de links/rechts schakelaar (7) kunt u de gewenste draairichting instellen en met de spray regelaar (4) kunt u de hoeveelheid spray instellen.

Let op! Bij gebruik van grotere frezen (10mm+) dient u het toerental van uw machine te verlagen tot maximaal 2/3e. Ook kan het handstuk bij gebruik van grotere frezen of langdurig gebruik op hoog toerental (Het rode gebied bij de regelaar) warm worden. Dit kan geen kwaad maar kan als onprettig ervaren worden tijdens uw gebruik.

## **Wat te doen als mijn spray niet (goed) werkt?**

1. Controleer of het reservoir (1) goed aangedraaid is, hij schoon is en of er genoeg heldere sprayvloeistof in het reservoir zit.
2. Controleer of het filter niet vuil is en vervang deze regelmatig. (± Elke 6 maanden)
3. Controleer of de witte afdichtingsring nog in de deksel van het reservoir zit.
4. Controleer of de sprayregelaar (4) niet dicht staat.
5. Prik het spraymondje door met de bijgeleverde naald.
6. Vul het reservoir met 70% Alcohol en zet de spray regelaar vol open en laat de machine een aantal minuten aan staan. Op deze manier kunnen eventuele verstoppingen los komen.

## **Wat te doen als mijn machine helemaal niks meer doet?**

1. Controleer uw eigen aansluitpunt.
2. Zet de hoofd schakelaar (6) aan en uit.
3. Sluit de oplader aan en controleer of de accu indicatie LED (2) wit brandt.
4. Wacht 15 minuten, dit geeft de automatische zekering tijd om te resetten.

## **Wat te doen als mijn handstuk het niet doet?**

1. Controleer of de hoofdschakelaar (6) en de stand-by knop (5) ingeschakeld zijn.
2. Controleer of uw links/rechts schakelaar (7) niet in het midden staat.
3. Controleer of de toerental regelaar (3) niet helemaal uit staat.

## **Onderhoud aan uw machine.**

Als fabrikant en servicepunt van de Orthofex motoren adviseren wij 1 keer per jaar een onderhoudsbeurt uit te laten voeren. Uit ervaring blijkt dat u de levensduur van uw machine met 10 jaar kunt verlengen door regelmatig onderhoud uit te laten voeren!

## **Tips voor het schoonmaken van uw machine.**

Maak nooit uw machine met alcohol schoon. Gebruik hier gewone allesreiniger of glassex voor, ditzelfde geldt voor het handstuk. Let op dat er geen vloeistof in het handstuk komt. Enkel de buitenkant reinigen met een frezenborsteltje.

**Voor de garantievoorwaarden zie de meegeleverde garantie kaart.**

Contact:

Email: [info@orthofex.nl](mailto:info@orthofex.nl)

Tel. nr.: 030-2313592

Website: [www.orthofex.nl](http://www.orthofex.nl)

# Orthofex

## Gebruiksaanwijzing OrthoSpray PRO



1. Uitneembaar Reservoir
2. Accu indicatie LED
3. Regelaar Toerental
4. Regelaar Spray

5. Stand-By Schakelaar
6. Hoofd Schakelaar
7. Links/Rechts Schakelaar
8. Aansluiting oplader

Gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe Orthofex pedicure motor. In deze korte handleiding helpen wij u op weg met uw nieuwe OrthoSpray PRO. Voor meer informatie kunt u terecht op [www.orthofex.nl](http://www.orthofex.nl) of neemt u contact op met de winkel waar u dit product heeft aangeschaft. De OrthoSpray PRO is geproduceerd en getest volgens de nieuwste methoden en zal u helpen het meeste uit uw pedicure behandeling te halen.

Door het reservoir (1) naar boven en naar links te trekken kunt u het glas los schroeven en vullen met Ortho-Spray Vloeistof. Let op dat het reservoir goed dicht gedraaid is, dit voorkomt drukverlies zodat er een goede verneveling van de spray plaats kan vinden.

Als u moeite heeft met het los en vast draaien van het reservoir kunt u de bijgeleverde tang hier voor gebruiken.

Voor u de machine kunt gebruiken dient u een fris in het handstuk te doen. Doe dit volgens de apart bijgeleverde gebruiksaanwijzing voor het handstuk.

U kunt de motor inschakelen door de hoofdschakelaar (6) om te zetten, het LED lampje (2) bij het reservoir zal dan wit gaan branden. Nu kunt u de machine aanzetten door op de stand-by schakelaar (5) te drukken.